

Colector de saliva para test de confirmacion de consumo de drogas

Colector de saliva QuantiSal® por inmunálisis

El colector de saliva QuantiSal® es un sistema para la recogida y transporte de muestras de saliva bajo las guías de los laboratorios toxicológicos y forenses.



- Volumen definido: El volumen agregado en el pad (3) puede contener desde un 10% a 1ml.
- Rápidez: En una media de 3 minutos se alcanza el volumen de muestra.
- Seguridad: Un indicador muestra cuando se alcanza el volumen de muestra de 1ml (2)

Procedimiento

- 1) Anotar los datos del paciente en el tubo
- 2) Extraer el colector (1) del envase.
- 3) Colocar el pad colector debajo de la lengua desde 3 hasta un máximo de 10 minutos. El pad no debe ser movido ni mordido durante el periodo de colección.
- 4) Mantener el colector en esta posición hasta que el indicador azul se decolore (2).
- 5) Sacar el colector de la boca, llevar hasta la funda de recolección (4), abrirla e introducir el colector.
- 6) Asegurarse de que la funda esta correctamente cerrada durante el transporte.
- 7) Los líquidos deben ser mezclados durante el transporte.
- 8) Enviar lo más pronto posible al laboratorio para que sea analizado con un sistema de análisis de saliva.